

snøgg®



# Animal

BANDAGES

Verbände für Tiere



Vertrieb durch:  
Medilutions UG  
Luisenhöhe 9a, 86701 Rohrenfels  
kundenservice@medilutions.de  
[www.medilutions.de](http://www.medilutions.de)

# Verbände für Tiere von Veterinären empfohlen

**Das Sortiment der Snøgg Verbände ermöglicht vielfältige und einfache Anwendung an Tieren.** Durch 25-jährige Erfahrung im Umgang mit Erste-Hilfe-Produkten für Tiere, sind unsere Verbände von Fachleuten, Landwirten und Tierhaltern empfohlen.

Der norwegische Veterinär Paul Stamberg von der Randesund Tierklinik erklärt: „Die Snøgg Verbände können sich zwar von herkömmlichen Verbänden unterscheiden, nichtsdestotrotz erreicht man mit ihnen schnelle Resultate sowohl zum Vorteil von Fachmann als auch dem zu behandelnden Tier.“

Ein anderer Experte, Bjørn Tore Anderssen, empfiehlt: „Wir benutzen seit 20 Jahren ausschließlich die Snøgg Animal Verbände in der Klinik. Hohe Absorptionsfähigkeit, Robustheit und ästhetische Eigenschaften machen diese Verbände besser als alternative Produkte.“

Bei Snøgg sind vier verschiedene Produkte erhältlich: **AnimalSoft**, **AnimalVet**, **AnimalPolster** und **ElastoQuick Sport**. Diese eignen sich hervorragend für unterschiedliche Anwendungen an verschiedenen Körperpartien, gleich welche Anforderungen an den Verband gestellt werden.

**Diese Broschüre befasst sich mit den meist herkömmlichen Anwendungsgebieten:**

- **Wundbehandlung:** verschiedene Verbände für unterschiedliche Wundtypen
- **Stützverband:** Polster- und Stützeigenschaften; anatomisch anpassbar
- **Druckverband:** Wundauflage zum Stoppen von Blutungen
- **Bandage zur Vorbeugung von Verletzungen:** lokale Anwendung

Unsere Verbände werden in verschiedenen Größen hergestellt wodurch für jedes Tier der richtige Verband zu finden ist.

Die Verbände können als „physiologische Verbände“ beschrieben werden und zeichnen sich durch einfache und schnelle Anwendung aus. Weil sie sich angenehm und sicher anfühlen, empfinden die Tiere den Verband nicht als störend.

1

## AnimalSOFT

6 x 450 cm Art.-Nr. 013074

Querelastischer Verband der einfach anzuwenden ist und die Beweglichkeit nicht einschränkt. AnimalSoft ist selbsthaftend und klebt nicht auf Haut, Fell oder Wunde. Kann direkt auf die Wunde gelegt werden.



2

## AnimalVET

8 x 100 cm Art.-Nr. 013071

8 x 500 cm Art.-Nr. 013072

14 x 500 cm Art.-Nr. 013073

Einzigartiger Verband der nur an sich selbst haftet und nicht auf Haut, Fell oder Wunde. Stark, flexibel und einfach anzupassen. Kann direkt auf die Wunde gelegt werden.



3

## AnimalPOLSTER

9 x 200 cm Art.-Nr. 012116

14 x 200 cm Art.-Nr. 012117

Einseitig klebender Schaumstoffverband. Ideal zum Polstern und zur Fixierung. Muss in Verbindung mit einer Kompresse, AnimalSoft oder AnimalVet angewendet werden.



4

## ELASTO<sup>®</sup> Sport QUICK

7,5 x 450 cm Art.no. 046001

ElastoQuick Sport ist eine längselastische Fixierbinde die an verschiedenen Körperteilen angewendet werden kann. Geeignet zur Fixierung von Kompressen oder anderen Bandagen.




# VERBÄNDE FÜR KLEINTIERE

**Erläuterung:**  
Die Zahlen 1-4  
bezeichnen  
welcher  
Verband in den  
Illustrationen  
gezeigt wird.

- ① AnimalSOFT
- ② AnimalVET
- ③ AnimalPOLSTER
- ④ ELASTO<sup>QUICK</sup> Sport

## BANDAGIEREN DES OHRS


**1.** Zu Beginn ein Stück AnimalVet zu einem Kegel formen um den Meatus zu beschützen. Danach ein Polster formen um das Ohr ruhig zu stellen.

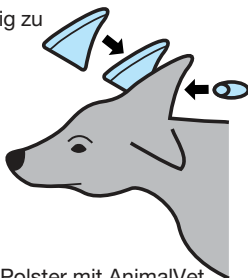

**2.** Das Polster mit AnimalVet fixieren. Das Wundsekret wird in den inneren Lagen aufgefangen und gelagert.



**3.** Das Ohr mit AnimalVet bandagieren. Mit einem größeren Stück AnimalPoster fixieren, klebt sowohl auf Haut als auch Fell. Eine Öffnung für den Gehörgang aussparen und das gesunde Ohr vom Verband frei lassen..

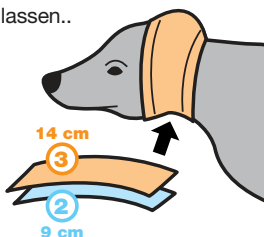


## BANDAGIEREN DES BEINS ① ②


**1.** Zu Beginn AnimalSoft oder AnimalVet als Fixierverband um das Bein wickeln.



**2.** Ein weiteres Stück abreißen das zwischen die Zehen passt. Am Fixierverband anlegen, um 180 Grad drehen, die schmale Seite zwischen die Zehen legen und dann auf der anderen Seite des Fixierverbandes andrücken. Den Vorgang für jeden Zeh wiederholen.

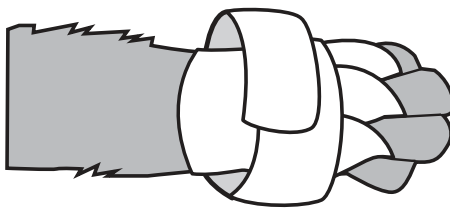


**3.** Eine zweite Lage um das Bein wickeln um den Verband zu fixieren. (Bei Bedarf abschließend ElastoQuick Sport anlegen.)

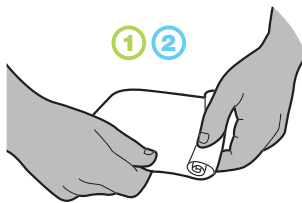


Um einen Druckverband anzufertigen, einfach AnimalSoft oder AnimalVet einrollen. Diesen Vorgang wiederholen um für nässende Stellen die Absorptionsfähigkeit zu erhöhen.

## BANDAGIEREN DER PFOTE ① ②

1. AnimalSoft oder AnimalVet zwischen die Zehenballen und den Hauptballen legen.

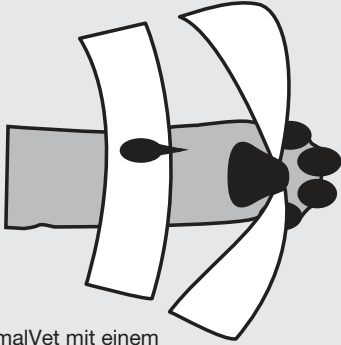


2. AnimalVet mit einem Einschnitt versehen und als Polster um die Daumenkrallen legen.

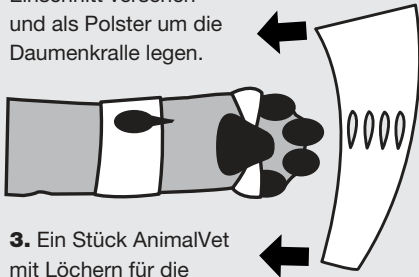

3. Ein Stück AnimalVet mit Löchern für die Zehenballen präparieren.





4. Die Zehenballen durch die Löcher führen und den Verband falten, wie auf der Skizze zu sehen.

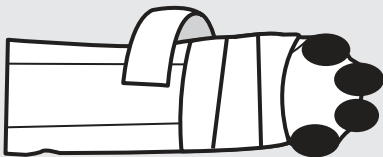

5. Bei Bedarf zusätzlich AnimalVet um die Pfote wickeln.


## FRAKTUREN

1. Dem gleichen Prinzip wie beim Bandagieren der Pfote folgen. Wichtig ist, die Pfote durch mehrere Lagen AnimalVet zu polstern (siehe Schritt 5).

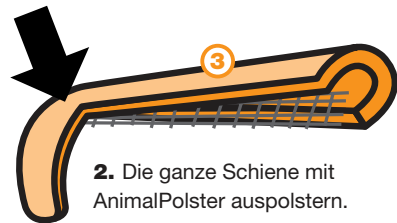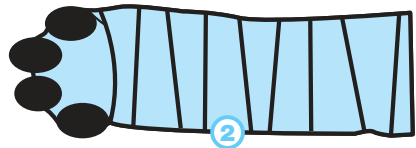

2. Die ganze Schiene mit AnimalPolster auspolstern.

3. Die Schiene mit ElastoQuick Sport fixieren. Dieses Prinzip vermindert das Risiko von wunden Stellen durch Scheuern der Schiene. Die Zehen sollen sich frei bewegen können um Mobilität zu garantieren und Blutstau zu verhindern.

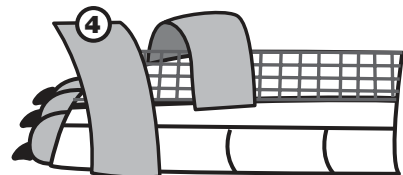

# VERBÄNDE FÜR GROBE TIERE

## Erläuterung:

Die Zahlen 1-4 bezeichnen welcher Verband in den Illustrationen gezeigt wird.


① AnimalSOFT

② AnimalVET

③ AnimalPOLSTER


④ ELASTO<sup>®</sup><sub>qu<sup>c</sup></sub>

## BANDAGIEREN DER ZITZE

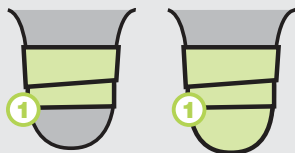


AnimalSoft bei Entzündungen des Euters oder zur Fixierung von Zitzenstiften verwenden.

## ELASTIZITÄT

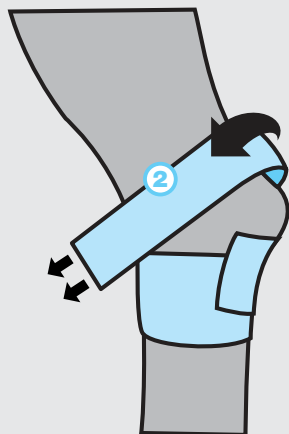


Beachten Sie wie die Elastizität ausgenutzt wird um den hinteren Muskel zu fixieren.

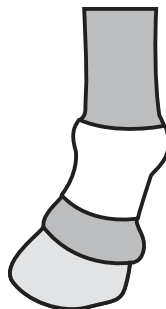


## INJEKTIONS- VERBAND

Der Verband wird direkt auf der Einstichstelle platziert. Es ist wichtig den elastischen Verband straff zu ziehen um ein Verrutschen zu verhindern.

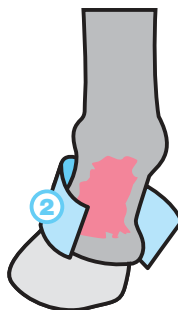


## MAUKE BEHANDLUNG

Eine Lage AnimalVet 14 cm ist zur Maukebehandlung geeignet..

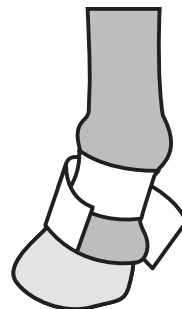

## HUF-/FESSELVERBAND


Beim Verbinden der Fesselbeuge wird zuerst ein Verband oberhalb der verletzten Stelle angebracht. Ein zweiter Verband wird auf der Einstichstelle platziert und überlappt den ersten Verband.

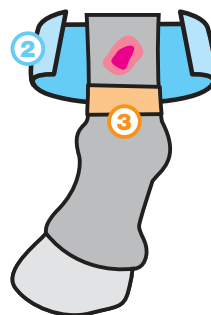

## WUNDVERBÄNDE

Das Bein mit einer Lage AnimalPolster unterhalb der Verletzung umwickeln. Die Wunde mit AnimalVet verbinden und den Verband 2-3 cm mit dem AnimalPolster überlappen. AnimalVet wird nach Bedarf gewechselt, während das AnimalPolster bis zum Ende der Behandlung verbleiben kann.

AnimalPolster direkt auf der Stelle anbringen die geschützt werden soll, jedoch NICHT direkt auf die Wunde legen.

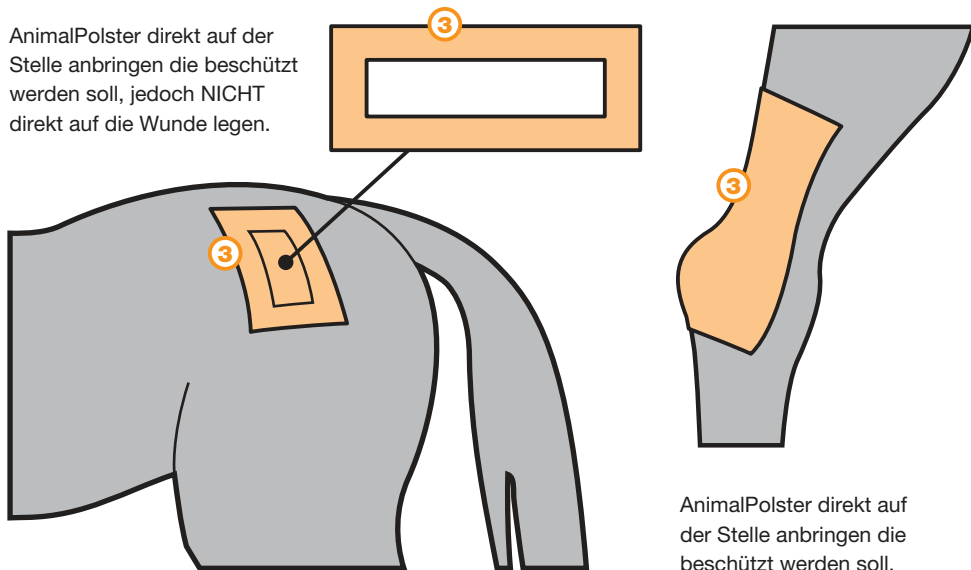


AnimalPolster direkt auf der Stelle anbringen die geschützt werden soll.




### ◀ INJEKTION IM VORDERFUßWURZELGELENK ② ③

Zu Beginn das Bein unterhalb des Vorderfußwurzelgelenks mit AnimalPolster umwickeln. Danach eine Lage 9 oder 14 cm AnimalVet auf den Injektionspunkt legen und den Verband mit dem AnimalPolster überlappen lassen um AnimalVet am Verrutschen zu hindern. Für stärkeren Halt, AnimalVet mit einer weiteren Lage AnimalPolster oberhalb des Vorderfußwurzelgelenks fixieren und dieses mit dem AnimalVet überlappen lassen.

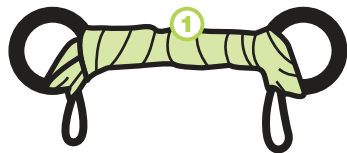

Falls ein Pferd Reizungen im Maul hat, kann das Gebiss mit AnimalSoft umwickelt werden um Schmerzen zu lindern.

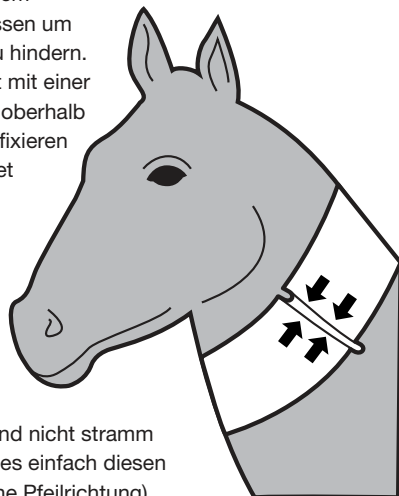

Falls der Verband nicht stramm genug sitzt, ist es einfach diesen zu straffen (siehe Pfeilrichtung).

# Verbände für Tiere von Veterinären empfohlen

Art.-Nr. 201592

PRODUKT	① Animal SOFT	② Animal VET	③ Animal POLSTER	④ ELASTO <sup>®</sup> Sport
<b>Selbsthaftend</b>	●	●		●
<b>Selbstklebend</b>			●	
<b>Haftet nur an sich selbst</b> (NICHT auf Haut, Fell oder Wunde)	●	●		
<b>Weich</b>	●	●	●	
<b>Kreuzelastisch</b>	●	●	●	
<b>Längselastisch</b>				●
<b>Porös</b>	●	●	●	●
<b>Absorbierend</b>	●	●	●	
<b>Stoppt Blutungen</b>	●	●		
<b>Hält auch im Wasser</b>	●	●		
<b>Geeignet als Erstverband, direkt auf die Wunde</b>	●	●		
<b>Geeignet als 2. Verbandsschicht</b>	●	●	●	●
<b>Geeignet als 3. Verbandsschicht</b>			●	●
<b>Fixierung</b>				●
<b>Stärke</b>	<b>1,9 mm</b>	<b>5 mm</b>	<b>5 mm</b>	

Vertrieb durch:  
Medilutions UG  
Luisenhöhe 9a, 86701 Rohrenfels  
kundenservice@medilutions.de  
www.medilutions.de